

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest zur Eigenanwendung (kolloidales Gold)

(Speichelproben)

Kurzanleitung

REF: LFA0401-5N




Vorbereitung

- Öffnen Sie Ihre Testpackung und überprüfen Sie den Inhalt.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.

Inhalt :


- 1 × Testkassette
- 1 × Steriler Einmaltupfer
- 1 × Röhrchen mit Extraktionspuffer
- 1 × Gebrauchsanweisung

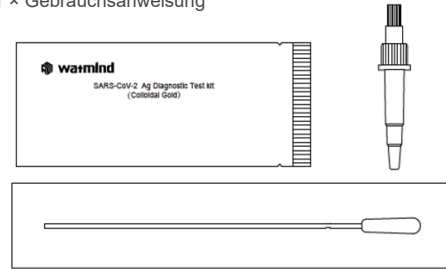

- Öffnen Sie den Beutel und legen Sie die Kassette auf eine saubere, trockene, flache Oberfläche. HINWEIS: Berühren Sie keine Teile auf der Innenseite der Karte.


Schritt 1. Ablauf der Probenentnahme

- Öffnen Sie die Tupferpackung und nehmen Sie den Tupfer heraus.
- Entnahme von Speichelproben: Drücken Sie die Zungenspitze gegen die untere Kieferwurzel, um den Speichel anzureichern. Bringen Sie den Oropharyngealtupfer für 10 Sekunden unter die Zunge, drehen Sie ihn 5 Mal und trinken Sie ihn vollständig.

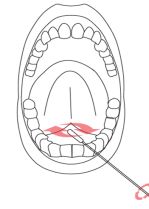


Schritt 2. Probenextraktion


- Öffnen Sie den unteren Deckel des Röhrchens, das mit Probenentnahmelösung vorgefüllt ist.
- Führen Sie den Tupfer in das Probenröhrchen und tauchen Sie anschließend den Tupferkopf vollständig in die Probe ein.
- Mischen Sie die Lösung, indem Sie den Tupfer mindestens 10 Mal kräftig gegen die Seite des Röhrchens drehen und das Röhrchen 5 Mal von Hand zusammendrücken, damit die Probe auf dem Tupfer vollständig in dem Extraktionspuffer gelöst wird.

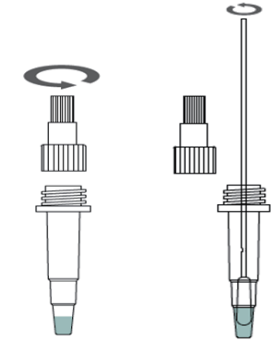


- Knicken Sie den Tupferkopf ab und belassen Sie ihn in dem Röhrchen.

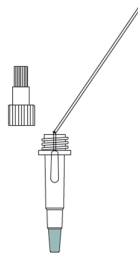

- Schließen Sie die untere Abdeckung des Röhrchens und schwenken Sie das Röhrchen 5-6 Mal.

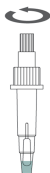

- Öffnen Sie die obere Abdeckung des Röhrchens.

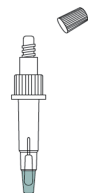


Schritt 3. Testverfahren

- Geben Sie 100µl (3 Tropfen) der Probe in die Vertiefung auf der Kassette. Schließen Sie den oberen Deckel des Röhrchens.



- Warten Sie 15 Minuten.

HINWEIS: Die Kassette darf während dieser Zeit nicht bewegt und/oder berührt werden.

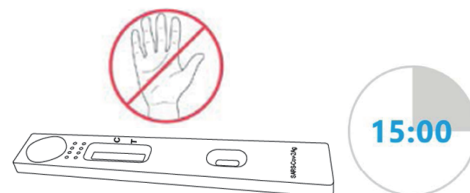

Schritt 4. Auswertung der Testergebnisse

- Interpretieren Sie die Testergebnisse nach 15-20 Minuten.



Positiv

Negativ



Ungültig

Ein positives Testergebnis muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte telefonisch an einen Arzt/Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt. Ohne Konsultation eines Arztes sollte keine medizinisch wichtige Entscheidung getroffen werden. Die Möglichkeit eines falsch-positiven sowie eines falsch-negativen Ergebnisses kann niemals ausgeschlossen werden. Sollten Sie ein negatives Ergebnis erhalten, aber trotzdem Symptome wie Husten, Fieber oder Schnupfen verspüren, empfehlen wir Ihnen, einen Arzt/Hausarzt zu kontaktieren. Auch ohne Symptome und bei negativem Ergebnis halten Sie sich bitte weiterhin an die geltenden Schutzmaßnahmen.

Symbole

	Verwendung in der In-vitro-Diagnostik		Siehe Gebrauchsanweisung
	Katalognummer		Chargennummer
	Verfalldatum		Herstellungsdatum
	Nicht wiederverwenden		Zwischen 2 und 30 °C lagern
	Von Sonnenlicht fernhalten		Trocken halten
	Hersteller		EU-Bevollmächtigter

Shenzhen Waimind Medical Co., Ltd.
8th Floor, Building A, No.16-1, Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi subdistrict, Pingshan District, 518118, Shenzhen, China.
Tel: +86 755-86969964 Fax: +86 755-26658059, <http://www.waimind.com>

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH, Eifestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany