


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

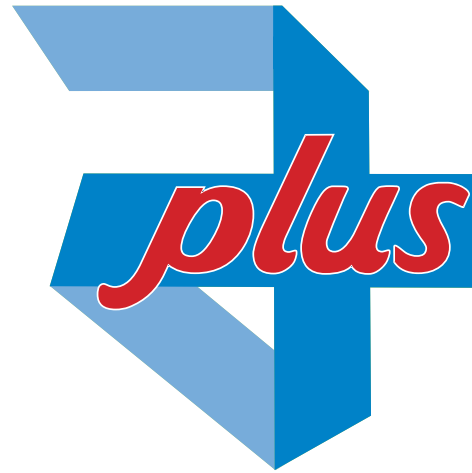

MyClean® FD

Flächendesinfektion



- Schnell und umfassend bakterizid, levurozid, tuberkulozid, virusinaktivierend, inkl. HBV/HIV, BVDV(HCV), sowie Vaccinia Viren, gemäß aktueller Empfehlung des RKI
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und SV40-Viren
- MRSA wirksam und getestet
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Sehr wirtschaftlich aufgrund niedriger Anwendungskonzentrationen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen

Anwendung: Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar, auch für empfindliche Oberflächen wie z.B Acrylglas, Pflegewannen etc. geeignet

Ausführungen: **MyClean-FD Flächendesinfektion**

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Flächendesinfektion / Surface Disinfection	Neutral / neutral	1 Liter / 1 litres	79630	4046153116539	10305999	14
Flächendesinfektion / Surface Disinfection	Neutral / neutral	5 Liter / 5 litres	79631	4046153116553	10306007	2
Flächendesinfektion / Surface Disinfection	Neutral / neutral	10 Liter / 10 litres	79632	4046153116577	10306013	1

Wirksamkeit:

Bakterizid, levurozid gemäß den Standardmethoden der DGHM/VAH:	1,50% - 15 Min. 1,00% - 30 Min. 0,5% - 60 Min. 0,25% - 240 Min.
Schnelldesinfektion	8,00% - 1 Min.
Tuberkulozid (M-Terrae) gemäß EN 14348 (geringe Belastung)	1,50% - 60 Min.
Begrenzt Viruzid	0,25% - 15 Min.
BVDV (HCV Surrogat Virus)	0,25% - 15 Min.
Vaccinia-Viren	0,25% - 15 Min. 1,00% - 30 Min. mit Belastung
Sv40 - Viren	1,00% - 60 Min.
Rota - Viren	1,50% - 15 Min.
Noro - Viren (FCV)	2,00% - 120 Min. ohne Belastung

Zusammensetzung: In 100g sind enthalten: 2,5g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid, 8,0g Didecyldimethylammoniumchlorid


Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG / VAH / HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit: ⏳ 3 Jahre

Symbole:



Achtung

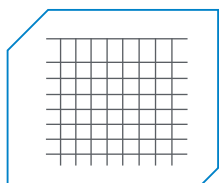

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MyClean-FD-Flächendesinfektion-20140318