



## Incidin® Active

# ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BEI HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN DER FLÄCHENDESINFEKTION

- ▲ Mit einzigartigem Wirkstoffsystem **PerOxyBalance®**
- ▲ Wirksam gegen *Clostridium difficile*
- ▲ VAH-gelistet, viruzid



# Incidin® Active

SPORENWIRKSAME DESINFEKTION UND REINIGUNG



Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum inkl. Viruzidie (z.B. Noroviren) und Sporizidie (z.B. Clostridium difficile Sporen)	Sicherheit auch bei höchsten Anforderungen
pH-neutrale Anwendungslösung	Hohe Materialverträglichkeit durch patentiertes Wirkstoffsystem <b>PerOxyBalance®</b>
Exzellente Desinfektions- und Reinigungsleistung	Kurze Einwirkzeiten ermöglichen schnelle und effiziente Zimmersanierung und kurzfristige Wiederbelegung
Im Wechsel mit Incidin® Plus und Incidin® Extra N zur Flächendesinfektion einsetzbar	Produktwechsel ohne Zwischenreinigung, einfache Integration in bestehende Prozesse



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte

CE 0297



Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.  
D BIOZID N-28815


## WIRKSAMKEIT

## KONZENTRATION

## EINWIRKZEIT

VAH-Liste (bakterizid, levurozid, mycobakterizid inkl. TB <sup>2</sup> )	%	g/L	Min.
Mit Mechanik, geringer und hoher Belastung	1	10	5
Mit Mechanik, geringer und hoher Belastung <sup>2</sup>	2	20	5
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)	%	g/L	Min.
EN 13727 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mycobakterizid)	1	10	15
EN 13704 (sporizid)	2	20	15
EN 14476 (viruzid)	2	20	10
EN 14476 (viruzid)	1	10	60
Clostridium difficile Sporen	%	g/L	Min.
Im praxisnahen Versuch mit Ribotyp O27	1	10	30
Aufgrund der Sporizidie gemäß EN 13704	2	20	15
ATCC 13720 im Suspensionstest	2	20	5
Zusätzliche Wirksamkeiten	%	g/L	Min.
Mycobakterizid inkl. TB*	1	10	30
Badewannendesinfektion	1	10	5

\* gem. DGHM 2001

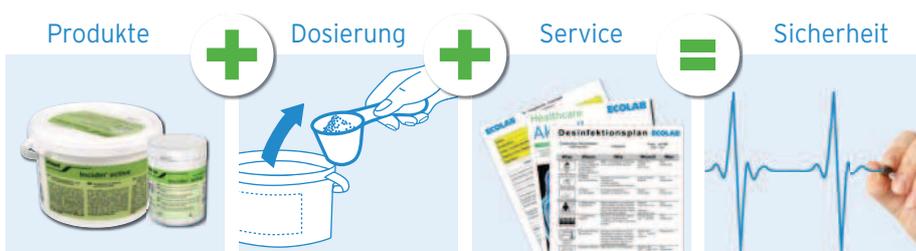

## UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

Regional Office  
Ecolab Deutschland GmbH  
Reisholzer Werftstr. 38-42  
40589 Düsseldorf  
Phone +49 (0) 211 98 93-0  
Fax +49 (0) 211 98 93-174  
[www.ecolabhealthcare.de](http://www.ecolabhealthcare.de)

Regional Office  
Ecolab Schweiz GmbH  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
Phone +41 (0) 614 66 94-66  
Fax +41 (0) 614 66 94-55  
[www.ecolab-suisse.ch](http://www.ecolab-suisse.ch)

## ANWENDUNGSHINWEISE

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten. Für ausreichende Lüftung ist zu sorgen.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

**Desinfektionsmittel sicher verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

## ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Hohe Flexibilität beim Ansetzen jeglicher Einsatzkonzentrationen und Mengen durch 1,5 kg Gebinde. Bitte wenden Sie sich bezüglich einer Dosiertabelle an Ihren Ecolab Fachberater.

## ZUSAMMENSETZUNG

1% Incidin® Active Lösung enthält: > 500 ppm Peressigsäure

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

## BESTELLINFORMATIONEN

Incidin® Active 30 518 70  
Dosen 24 x 160 g

Incidin® Active 30 518 50  
Eimer 4 x 1,5 kg

