



MULLTUPFER

REF 877004

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Tupfer haben einen Durchmesser von 1,0 cm. Der Mull (DIN EN 14079, Typ 20) ist ohne Gummiring in eine runde Form geschlungen. Deshalb werden diese Tupfer auch Schlinggazetupfer genannt. Sie werden zur Versorgung von Wunden sowie zur Hautdesinfektion verwendet. Vor diesen Tätigkeiten hat eine Sterilisation mit einem validierten Verfahren (Feuchte Hitze bei 121°C/134°C, 2 bis 3 bar, nach DIN EN ISO 17665, Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135) zu erfolgen.

Kontraindikationen

Es sind keine Kontraindikationen bekannt.

Bei einer bekannten Allergie gegen eine der u. g. Komponenten darf das Produkt nicht angewendet werden.

Zusammensetzung

Baumwolle

Normative und gesetzliche Anforderungen

Der Mulltupfer ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 4 eingestuft.

Der Mull entspricht den Vorgaben der DIN EN 14079 Typ 20.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



Vor Gebrauch sterilisieren