

Floor Wipes

Einwegtücher für die hygienische Bodendesinfektion

- ✓ **hygienische Sicherheit**
- ✓ **universelle Praktikabilität**
- ✓ **einfache Handhabung**
- ✓ **zur Tränkung mit allen üblichen Flächendesinfektionsmitteln**



Vliestuchrolle

Die FloorWipes bestehen aus einem 100%-igen Polyestervlies und stellen somit eine optimale Wirkstoffabgabe bei der Anwendung sicher. Zudem sind sie aufgrund der Quervernetzung extrem reißfest und strapazierfähig.

Das FloorWipes Wischsystem ist sofort einsetzbar. Jede Vliestuchrolle ist mit einem Chargenetikett versehen, womit Charge, Ansatz- und Verfalldatum der Desinfektionslösung dokumentiert werden.

Durch die Einzelblattentnahme aus dem wieder-verschließbaren Spendersystem sind die Floor Wipes sehr sparsam im Verbrauch.

Anwendungsbereiche

Das FloorWipes Wischsystem eignet sich hervorragend für die hygienische Bodendesinfektion von maximal 2 m². Die Vliestücher werden in Bereichen wie Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflege- und Gemeinschaftseinrichtungen angewendet - insbesondere dann, wenn kein Reinigungswagen verfügbar ist (z.B. in der Nachtschicht, im Rettungswagen, usw.).

Anwendung



1. Handschuhe anlegen.



2. FloorWipes-Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in ein geeignetes, desinfiziertes und trockenes Spendersystem einsetzen.



3. Je nach Rollengröße muss ausreichend gebrauchtsfertige Desinfektionslösung eingefüllt werden.



4. Vliestuch von unten durch die Entnahmeöffnung führen.



5. Beigefügtes Chargenetikett ausfüllen und aufkleben.



6. Tuch entnehmen, auf dem Boden ausbreiten und mittels Klettverbindung am Wischbrett befestigen.



7. Boden sorgfältig wischen, dabei auf vollständige Benetzung achten und die Einwirkzeiten des jeweiligen Desinfektionsmittels einhalten.

Floor Wipes

Einwegtücher für die hygienische Bodendesinfektion

Gutachten

Die Wirksamkeit der Anwendungslösung nach 28 Tagen mit marktüblichen Flächendesinfektionsmitteln im Spendersystem ist für die MediWipes durch externe, unabhängige Labors begutachtet.

Für folgende Flüssigkeiten ist ein 4 Felder Flächentest Gutachten auf Anfrage erhältlich:

- MediSept rapid „melone“
- Biguanid Fläche N
- Incidin Extra N
- Incidin Plus
- Microbac forte

Zubehör

Für jede FloorWipes Vliestuchrolle ist ein passendes Spendersystem erhältlich. Die entsprechenden Größen sind unter „Lieferformen“ vermerkt. Der PopUp mit seiner sternförmigen Einkerbung im Entnahmesystem und der zugehörige Verschlussdeckel verhindern eine Austrocknung der Vliestücher.

Weiter sind zu den Vliestüchern verschiedene Wischmophalter verfügbar.

Lieferformen

Tuchqualität	Material	Blattmaß	Blattzahl	Artikel-Nr.	VPE	Spendersystem
premium	PET <small>glatt</small>	ca. 20 x 44 cm	40	2010404420602	5 Rollen	Dose „XXL“
			80	201080442602	5 Rollen	Eimer „XXL“
			120	2011204420602	4 Rollen	Eimer „XXL“

Varianten Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.	VPE
Paket Halterung 40	Wischmophalter 40 cm breit + Alu-Teleskopstiel	410301	1 Halter + 1 Stiel
Paket Halterung 30	Wischmophalter 30 cm breit + Alu-Teleskopstiel	410302	1 Halter + 1 Stiel
Halterung einteilig	Wischmop mit 27 cm breitem Wischbrett	410110	1 Wischmop

Umweltinformationen

Unsere Produkte werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt.