

schülke wipes safe & easy


Befüllung unter hygienischen Bedingungen.

safe & easy
bagless system

Hinweis

Zum Personalschutz sowie zum Schutz der schülke wipes safe & easy empfehlen wir die Arbeitsfläche und die Hände zu desinfizieren, sowie das Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhen.*

* Gemäß TRBA 250, Absatz 4.1.3.

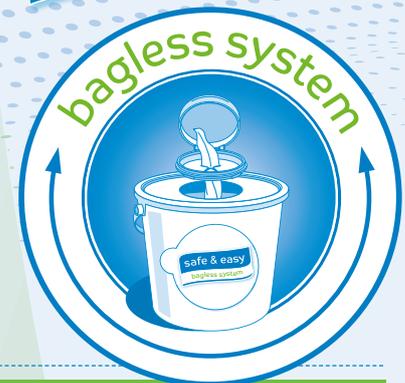

Schritt 1

Öffnen Sie das selbsthaftende Siegeletikett des Eimers.

Auf hygienisches Arbeiten achten, Handschuhe nicht während der Arbeit kontaminieren!



Schritt 2

Kleben Sie das Siegeletikett auf die entsprechende Seite des Spendereimers.



Schritt 3

Gießen Sie einmalig 2 Liter bei einem gebrauchsfertigen Produkt oder 2,5 Liter Gebrauchs- lösung aus einem angesetzten Konzentrat langsam spiralförmig über die Vliesrolle im Eimer.



Schritt 4

Ziehen Sie das innerste Tuch der Vliestuchrolle durch die Entnahmeöffnung des Verschlusses. Achten Sie darauf, den Deckel vorsichtig zu öffnen.



Schritt 5

Verschrauben Sie den Verschluss mit dem Spendereimer. Achten Sie darauf, dass der Verschluss dabei geschlossen ist.



Schritt 6

Verwerfen Sie das erste Tuch und verschließen Sie den Deckel sorgfältig. Beschriften Sie das Etikett.



Schritt 7

Beschriften Sie das Etikett



Schritt 8

Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit einsatzbereit.

30 Min.
warten



Schritt 9

Nach Ablauf der Standzeit oder Verbrauch entsorgen. Nicht zur Wiederaufbereitung vorgesehen.



Entsorgen Sie bitte den Spendereimer mit etwaigen Produktresten und Tüchern nach Ablauf der Standzeit von bis zu 28 Tagen. Nicht zur Wiederaufbereitung vorgesehen.