

# MEDIZID® Rapid

gebrauchsfertige, aldehydfreie Sprühdesinfektion für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände



- ✓ VAH - zertifiziert
- ✓ bereits in 30 Sek. wirksam
- ✓ sehr gute Materialverträglichkeit
- ✓ wirkt bakterizid (MRSA), fungizid, tuberkulozid (inkl. M.terrae) und viruzid
- ✓ begrenzt viruzid und ist damit umfassend wirksam gegen alle behüllten Viren (BVDV/Vaccinia inkl. HBV, HIV, HCV)
- ✓ wirksam gegen alle unbehüllten Viren (Rota- und Noroviren, Polio /Adeno)

SPRÜHDESINFEKTION

REF	Artikel	Karton	Europalette
01002D	250 ml Flasche	12 x 250 ml	130 Karton
00975D	500 ml Flasche	18 x 500 ml	60 Karton
00976D	1 l Flasche	12 x 1 l	32 Karton
00977D	5 l Kanister	2 x 5 l	52 Karton

## Zubehör:

REF	Artikel
00995	Sprühkopf 1 l
00931	Kanisterdosierpumpe 5 l
00932	Kanisterschlüssel 5 l
00996	Kanisterhahn 2 l + 5 l

# MEDIZID<sup>®</sup> Rapid

## Zusammensetzung:

In 100 g sind enthalten:

30 g 1-Propanol, 15 g 2-Propanol, 10 g Ethanol, 0,05 g Didecylmethylammoniumpropionat, 0,02 g Alkylaminguanidindiacetat. Weitere Bestandteile: Duftstoffe, Nichtionische Tenside.

## Präparatetyp/Anwendungsbereiche:

MEDIZID<sup>®</sup> RAPID ist ein gebrauchsfertiges, sehr schnell wirkendes Präparat zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen, medizinischer Geräte und Gegenständen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen. Ideal für Bereiche, in denen zwischen Behandlungen und Eingriffen sehr kurze Einwirkzeiten erforderlich sind.

MEDIZID<sup>®</sup> RAPID ist ein alkoholisches Produkt. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen.

## Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise:

Beim Umgang mit dem Konzentrat gemäß Gefahrstoffverordnung: Entzündlich. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen gründlich abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Beim Umgang mit dem Produkt Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht über 50°C lagern.

## Wirksamkeit:

### Bakterizid, fungizid, tuberkulozid

DGHM / VAH-Liste: 5 Min.

M.-terrae: 30 Sek.

### Behüllte Viren

BVDV/Vaccinia: 30 Sek.

HBV / HIV / HCV: 30 Sek.

### Unbehüllte Viren

Rotavirus: 30 Sek. Norovirus: 3 Min.

## Anwendung:

MEDIZID<sup>®</sup> RAPID ist gebrauchsfertig. Die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände sind bis zur vollständigen Benetzung einzusprühen. Fläche ggf. mit trockenem, sauberem Tuch trockenwischen.

## Begutachtung:

Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren:

Prof. Dr. med. Ralph Schubert, Juli 2005  
HygCen, Prof. Dr. med. H.-P. Werner, November 2008

Bestimmung der bakteriziden Wirkung im quantitativen Suspensionstest:  
HygCen, Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Februar 2009

## Weitere Angaben:

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.

## Hinweise:

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in Hinblick auf Materialverträglichkeit sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.